

ELETRODOS AMBU

Ambu A/S

Fabricantes:	Distribuidores:	Distribuidor no Brasil:
<p>Ambu A/S Baltorpbakken 13 DK-2750 Ballerup Dinamarca</p> <p>Firma Ambu, S.L. Alcalá 261, 265 ed. 1, 3º izq., ES – 28027, Madrid Espanha</p> <p>Ambu Sdn. Bhd. 336938-A, Lot 69B Lintang Bayan Lepas 6, Phase IV, 11900, Penang Malásia</p> <p>Ambu Ltd. – Warehouse & Process Complex Building N° C Xiang Yu, F.T.Z., Xiamen 361006 China</p>	<p>Ambu A/S Baltorpbakken 13 DK-2750 Ballerup Dinamarca</p> <p>Firma Ambu, S.L. Alcalá 261, 265 ed. 1, 3º izq. ES – 28027, Madrid Espanha</p> <p>Ambu Sdn. Bhd. 336938-A, Lot 69B Lintang Bayan Lepas 6, Phase IV, 11900, Penang Malásia</p> <p>Ambu Ltd. – Warehouse & Process Complex Building N° C Xiang Yu, F.T.Z., Xiamen 361006 China</p> <p>Ambu, Inc. 6740 Baymeadow Drive Glen Burnie, Maryland, 21060 Estados Unidos da América</p>	<p>Medstar Importação e Exportação EIRELI. Rua Valêncio Soares Rodrigues, 89 Sala 1 – Centro CEP 06730-000 Vargem Grande Paulista/SP Tel.: (11) 5092-3700 Fax: (11): 5535-0989</p>

Isento de Registro pelo Ministério da Saúde**Cadastro ANVISA nº: WWWWWW****Responsável Técnico: José Fernando de Menezes – CRF-SP: 26262****Conteúdo da embalagem:**

10 ou 50 Eletrodos Ambu

1 Manual de Instruções

Instruções de Uso

1. Indicação de Uso

Os Eletrodos Ambu são utilizados, em conjunto com um equipamento de eletrocardiograma (ECG), para monitorar o comportamento cardíaco do paciente, em situações de repouso ou estresse.

2. Modo de utilização

1. Descole a proteção do eletrodo e cole-o no corpo do paciente, de acordo com o protocolo adotado pelo hospital/clínica;
2. Conecte a derivação do dispositivo de ECG ao eletrodo;
3. Conecte a derivação ao dispositivo de ECG;
4. Siga as instruções recomendadas para seu equipamento de ECG;
5. Após finalizar o exame, descole cuidadosamente o eletrodo da pele do paciente, e o descarte de acordo com os protocolos locais.

3. Validade

Os eletrodos em embalagem fechada possuem validade de 18 meses. O fabricante recomenda o uso único.

4. Embalagem

Os eletrodos Ambu são embalados em envelope plástico contendo 10 ou 50 unidades.

5. Condições de Armazenamento, Transporte e Manipulação

O produto deve ser armazenado/transportado/manipulado em ambiente ventilado, seco, a temperatura ambiente, e na ausência de substâncias corrosivas.

Durante o transporte, o material deve permanecer protegido da luz solar e da chuva.

O produto não necessita de manutenção durante o uso.